

Istruzioni d'uso & manutenzione

01153 CINTURA TRANSFER APERTA 01154 CORSETTO TRANSFER CHIUSO



Trattasi di due cinture (una aperta e l'altra chiudibile) che vengono utilizzati da due operatori per trasferire pazienti da un luogo all'altro. Gli ausili sono provvisti di due maniglie in poliestere che permettono di spostare il paziente senza dover impugnare i suoi indumenti.

1. Suggerimenti utili

1.1 Trasferimento dalla posizione seduta alla postura eretta

Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente. Utilizzando una delle tecniche più appropriate (ci sono maniglie verticali ed orizzontali, da utilizzare in relazione al peso del paziente, all'altezza dell'operatore e al modo in cui si sostiene il paziente) uno dei due operatori può aiutare al paziente a mettersi in posizione eretta. E' opportuno bloccare le ginocchia del paziente durante questa operazione.

Annotazione : questa manovra va effettuata esclusivamente con pazienti che presentano delle capacità minime di mettersi e/o mantenersi in posizione eretta.

1.2 Deambulazione

Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente come descritto al punto 1.1. Il paziente potrà successivamente sostenuto e supportato durante la deambulazione o il mantenimento della postura eretta. Le braccia del paziente devono rimanere libere in modo da permettergli l'utilizzo di altri ausili.

1.3 Correzione della postura sdraiata nel letto (in combinazione all'art. 01142 TRANSFER MAT GRANDE o art.01143 TRANSFER MAT PICCOLO)

Posizionate la cintura intorno alla vita del paziente come descritto al punto 1.1. In presenza di due operatori, uno dei due può collocare la cintura sotto i glutei del paziente (le gambe del paziente vanno sollevate). E' opportuno abbassare la testata del letto. Utilizzare le maniglie per tirare il paziente nella posizione desiderata utilizzando una delle tecniche più appropriate.

2. Caratteristiche tecniche

Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza
01153	CINTURA TRANSFER APERTA	21,5 cm	62 cm
01154	CORSETTO TRANSFER CHIUSO	16,5 cm	41-114 regolabile


3. Pulizia e manutenzione

Gli ausili possono essere lavati in lavatrice a 71°C. Non utilizzare l'asciugatrice. Controllare regolarmente l'ausilio inerente lo stato d'usura e interrompete qualsiasi attività in caso di anomalie o danni. In caso di dubbi contattare l'assistenza tecnica della CHINESPORT SPA.


8. Assistenza Tecnica

CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698
assistenza@chinesport.it

Alzarsi dalla sedia

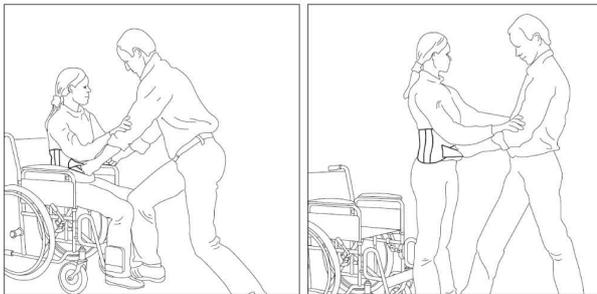

Applicazione

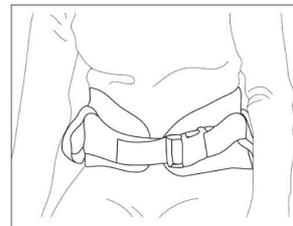

Riabilitazione a fasi



Spostamento nel letto

