

Istruzioni d'uso & manutenzione

01144 TELO UNI-SEDIA 01145 TELO UNI-LETTO



Trattasi di ausili che prevengono lo scivolamento involontario del paziente nel letto o sulla sedia. Il movimento dei teli è uni-direzionale (verso lo schienale sulla sedia e verso la testata sul letto) bloccando eventuali scivolamenti involontari. Il paziente riesce in questo modo a mantenere la sua posizione e l'operatore è meno sottoposto a sovraccarichi alla schiena dovuti a frequenti sollevamenti dei pazienti che scivolano nel letto in posizioni ergonomicamente scorrette.

1. Istruzioni d'utilizzo

1.1 Sulla sedia

- L'ausilio va collocato sulla sedia prima di fare accomodare il paziente.
- La freccia riportata sul logo deve essere orientata verso lo schienale della sedia.
- Il paziente può essere posizionato premendo leggermente sulle ginocchia del paziente mentre sta seduto in modo eretto oppure leggermente inclinato verso avanti.

1.2 Sul letto

- Appoggiate il telo arrotolato per metà nel senso della lunghezza del paziente sul letto; girate il paziente sul fianco ed estraete il telo sotto il corpo del paziente in modo da poterlo collocare completamente aperto sul letto sotto il corpo della persona. L'ausilio va posizionato tra le spalle ed i glutei del paziente ; il lato aperto deve essere orientato verso i lati del letto.
- La freccia riportata sul logo deve essere orientata verso la testata del letto

2. Pulizia e manutenzione

Gli ausili possono essere lavati in lavatrice a 71°C. Non utilizzare l'asciugatrice. Controllare regolarmente l'ausilio inerente lo stato d'usura e interrompete qualsiasi attività in caso di anomalie o danni. In caso di dubbi contattare l'assistenza tecnica della CHINESPORT SPA.

3. Caratteristiche tecniche :

01144 TELO UNI SEDIA 45 X 40 cm

01145 TELO UNI-LETTO 80 X 70 cm

CHINESPORT SPA

Via Croazia, 2
33100 UDINE-ITALY
Tel. 0432621621
Fax 0432621620





C.F. e P.IVA IT 00435080304
Cap. Soc. € 1.377.750,00 i.v.
Reg. Impr. Udine 00435080304
M/UD 007048
<http://www.chinesport.it>
e-mail: chinesport@chinesport.it




4. Assistenza Tecnica

CHINESPORT SPA
Via Croazia 2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698
assistenza@chinesport.it

Preparazione e applicazione

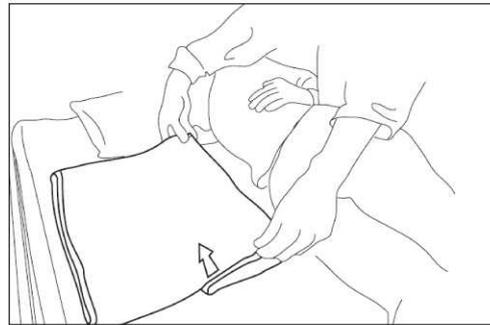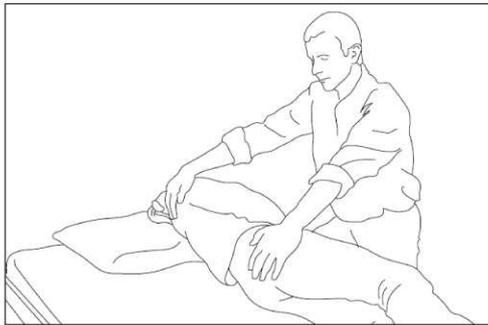

Spostamento verso l'alto

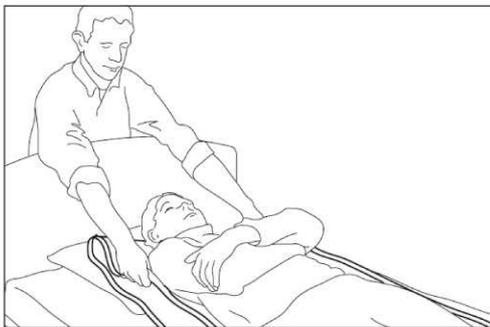

Spostamento laterale

