

Istruzioni d'uso & manutenzione

01142 TRANSFER MAT GRANDE 01143 TRANSFER MAT PICCOLO



1. I **TRANSFER MAT** sono dei materassini imbottiti di materiale molto liscio e flessibile. Vengono posizionati parzialmente oppure completamente sotto il paziente per facilitare le operazioni di trasferimento utilizzando il movimento di slittamento. Grazie alla caratteristica dei materassini di ruotare su se stessi si evita ogni frizione tra il materasso e la persona che deve essere trasferita, condizione fondamentale nella prevenzione delle piaghe di decubito. Si tratta di ausili particolarmente utili per la movimentazione laterale (per esempio da letto a letto o a lettiga), per riposizionare il paziente nel letto o per trasferimenti dal letto alla sedia. L'utilizzo dei materassi con i teli a corredo incrementano la facilità d'uso per gli operatori e riducono i rischi di danni alla schiena.

2. Posizionamento dei materassi sotto il paziente

L'ausilio va posizionato sotto il paziente (tra spalle e glutei) rotolando la persona sul fianco e facendo scivolare il materasso sotto il corpo. Per riposizionare il paziente nel letto si deve infilare il materassino completamente sotto il corpo (piega del materasso in direzione fondo letto) ; per movimentazioni laterali si deve collocare l'ausilio per metà sotto il corpo del paziente, sul lato verso il quale deve essere trasferita la persona.

3. Riposizionare il paziente nel letto

- Il paziente può essere riposizionato con l'ausilio dei materassi evitando qualsiasi frizione, fonte di eventuale dolore per il paziente.
- Si intende da se che la testata del letto deve essere abbassata durante questa operazione e si suggerisce di portarla in posizione più bassa della parte dei piedi in modo da trarre vantaggio della forza di gravità.
- Stimolare il paziente a partecipare attivamente spingendo con i piedi oppure tirando con le mani eventuali sostegni. In questo modo si riduce sensibilmente il carico sostenuto dall'operatore.

CHINESPORT SPA

Via Croazia, 2
33100 UDINE-ITALY
Tel. 0432621621
Fax 0432621620



C.F. e P.IVA IT 00435080304
Cap. Soc. € 1.377.750,00 i.v.
Reg. Impr. Udine 00435080304
M/UD 007048
<http://www.chinesport.it>
e-mail: chinesport@chinesport.it



4. Girare il paziente

- Il paziente può facilmente essere posizionato sul fianco e riportato nella posizione originaria con il presente ausilio.
- Per poter modificare frequentemente le posizioni del paziente si può lasciare l'ausilio sotto il corpo del paziente.

5. Altri trasferimenti possibili

L'ausilio può essere utilizzato anche per altri trasferimenti come per esempio durante il rifacimento del letto o trasferimento in posizioni sedute.

6. Misure disponibili :

01142 Cm 190 x 65

01143 Cm 72 x 70

7. Pulizia e manutenzione

Gli ausili possono essere lavati in lavatrice a 71°C. Non utilizzare l'asciugatrice. Controllare regolarmente l'ausilio inerente lo stato d'usura e interrompete qualsiasi attività in caso di anomalie o danni. In caso di dubbi contattare l'assistenza tecnica della CHINESPORT SPA.

8. Assistenza Tecnica


CHINESPORT SPA

Via Croazia 2 - 33100 UDINE



Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698

assistenza@chinesport.it

Spostamento verticale

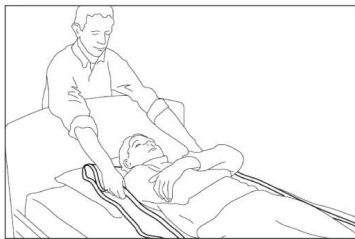

Spostamento laterale

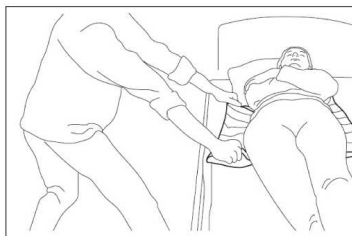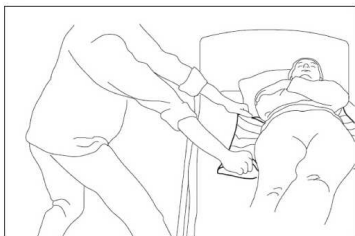

Preparazione e applicazione

