


## Istruzioni d'uso & manutenzione

### 01149 ASSE TRANSFER

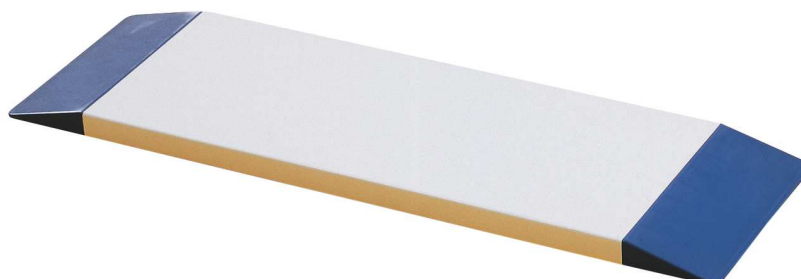

Trattasi di un ausilio per il trasferimento tra due oggetti di uguale altezza (per esempio da letto a carrozzina, tra due carrozzine, etc.). Questa tavoletta liscia di PVC forma un ponte sul quale l'utilizzatore può scivolare. Entrambi i terminali dell'asse sono provvisti di corde che il paziente può impugnare e il piano d'appoggio dell'asse è provvisto di supporti antiscivolo in modo che l'ausilio appoggi in modo sicuro sull'oggetto sottostante (per esempio il letto).

#### 1. Suggerimenti utili

- L'ausilio va collocato tra le due superfici sulle quali deve essere trasferito il paziente. E' molto importante collocare l'asse in modo che le parti antiscivolo appoggino saldamente su una superficie fissa e stabile onde evitare uno scivolamento non appropriato.
- A completamento del trasferimento si può estrarre facilmente l'asse sotto il corpo del paziente.
- Il paziente può tenersi per supporto alle due corde laterali.
- L'asse può essere combinata con i TRANSFER MAT art. 01142 o 01143 oppure con il DISCO DUO art. 01151.
- In caso di presenza dell'operatore si suggerisce allo stesso di posizionarsi di fronte o dietro il paziente.

#### 2. Pulizia e manutenzione

La superficie va pulita con un panno umido e detergente o disinfettante appropriato (non acido e non abrasivo).

#### 3. Caratteristiche tecniche

Lunghezza 67 cm  
Larghezza 20 cm  
Spessore 2,5 cm  
Peso 0,9 kg

#### 4. Assistenza Tecnica

CHINESPORT SPA -  
Via Croazia 2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698  
[assistenza@chinesport.it](mailto:assistenza@chinesport.it)

#### Preparazione e applicazione

